

HP CELL VITARAN *i*



**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

SPECYFIKACJA



Produkt	HP CELL VITARAN <i>i</i>
Klasyfikacja	Wyrób medyczny kl. III
Aktywny składnik	Polynucleotide Sodium
Stężenie	20mg/ml
Igła	33GX4mm x 1 szt.
Opakowanie	1ml x 1 ampułkostrzykawka
Termin ważności	24 miesiące od daty produkcji

ZASTOSOWANIE

Jest to **substancja nawilżająca i troficzna**, którą stosuje się głównie w celu poprawy jędrności, elastyczności i napięcia skóry. Uzyskane przez nią efekty mogą **ułatwiać przemodelowanie obszarów silnie zwłókniałych**, takich jak **rozstępy i blizny**, w ramach protokołów leczenia dostosowanych przez lekarza prowadzącego.

- ✓ Redukcja zmarszczek mimicznych ("kurzych łapek") oraz płytkich zmarszczek wokół oczu
- ✓ Redukcja cieni pod oczami
- ✓ Odmłodzenie i rewitalizacja skóry twarzy
- ✓ Niwelowanie zmarszczek i wiotkości skóry
- ✓ Poprawa elastyczności i nawilżenia skóry
- ✓ Poprawa napięcia i tekstury delikatnych obszarów szyi, dekoltu, dłoni
- ✓ Naprawa i odnowa skóry ciała i włosów
- ✓ Terapia rozstępów i blizn

ZABIEGI

Iniekcje

Głębokość: podanie śródskórne
1 sesja: 1 ampułkostrzykawka/okolica

Sposób stosowania

Odległość: 1,5 ~ 2 cm
1 ampułkostrzykawka co 2 ~ 4 tygodnie w serii od 3 do 5 zabiegów
Objętość: 0,01 ~ 0,02 cm³ (okolice oka)
0,03 ~ 0,05 cm³ (twarz)



Ministry Of Food And
Drug Safety (KFDA)

✓ Drug Master File & BGMP



✓ ISO13485



✓ GMP



✓ HACCP
(Fish farm)



✓ CE 2265

Oficjalny dystrybutor marki

HP CELL VITARAN *i* w Polsce:

ODA Medical Sp. z o.o.

ul. Toruńska 18c/c

80-747 Gdańsk

www.odamedical.pl

+48 606 979 670

+48 795 641 875