



HP CELL VITARAN *i*



**TO JEST WYRÓB MEDYCZNY.
UŻYWAJ GO ZGODNIE Z INSTRUKCJĄ
UŻYWANIA LUB ETYKIETĄ.**

SPECYFIKACJA

Preparat		
	HP CELL VITARAN <i>i</i>	HP CELL VITARAN <i>i</i> II
Klasyfikacja	Wyrób medyczny kl. III	
Aktywny składnik	Polynucleotide Sodium	
Stężenie	20mg/ml	
Igła	33G (4mm) x 1 szt.	
Opakowanie	1 ampułkostrzykawka x 1 ml	1 ampułkostrzykawka x 2 ml
Termin ważności	24 miesiące od daty produkcji	

ZASTOSOWANIE

Jest to **substancja nawilżająca i troficzna**, którą stosuje się głównie w celu poprawy jędrności, elastyczności i napięcia skóry. Uzyskane efekty mogą **ułatwiać przemodelowanie obszarów silnie zwłókniałych**, takich jak **rozstępy i blizny**, w ramach protokołów leczenia dostosowanych przez lekarza prowadzącego.

- ✓ Redukcja zmarszczek mimicznych ("kurzych łapek") oraz płytkich zmarszczek wokół oczu
- ✓ Redukcja cieni pod oczami
- ✓ Odmłodzenie i rewitalizacja skóry twarzy
- ✓ Niwelowanie zmarszczek i wiotkości skóry
- ✓ Poprawa elastyczności i nawilżenia skóry
- ✓ Poprawa napięcia i tekstury delikatnych obszarów szyi, dekoltu, dłoni
- ✓ Naprawa i odnowa skóry ciała i włosów
- ✓ Przemodelowanie obszarów silnie zwłókniałych, takich jak rozstępy i blizny

ZABIEGI

Iniekcje

Głębokość: podanie śródskórne
1 sesja: 1 ampułkostrzykawka


Sposób stosowania

Odległość: 1,5 ~ 2 cm

Częstotliwość: 1 ampułkostrzykawka co 2 ~ 4 tygodnie w serii od 3 do 5 zabiegów

Objętość: 0,01 ~ 0,02 cm³ (okolice oka)
0,03 ~ 0,05 cm³ (twarz)

BADANIE KLINICZNE

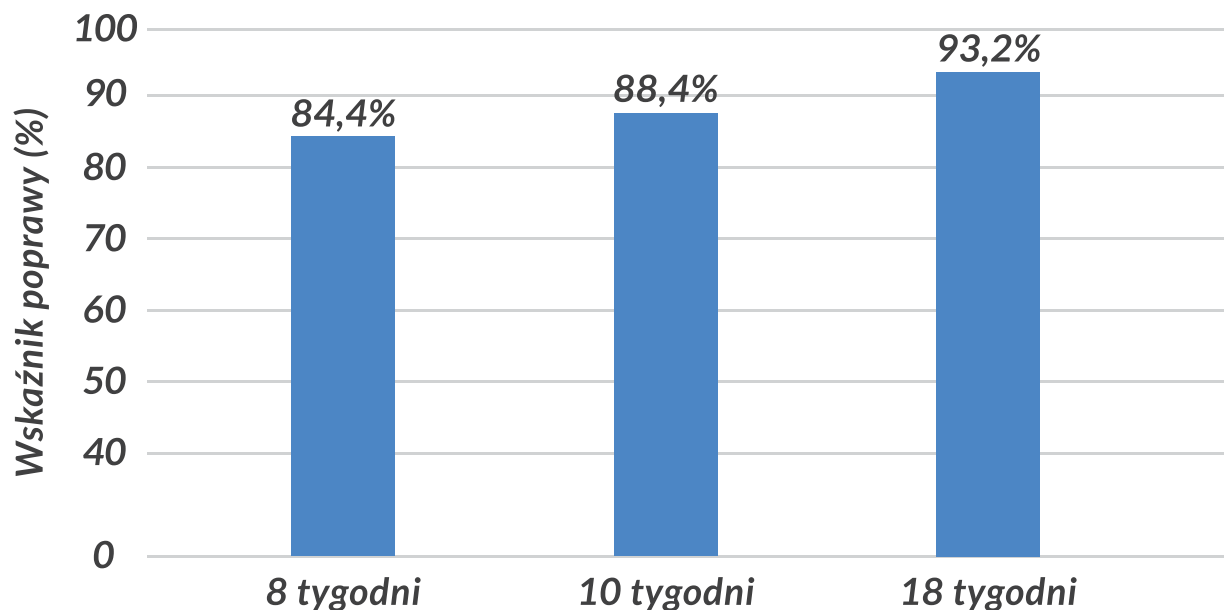

Jednośrodkowe, randomizowane badanie pilotażowe z zastosowaniem ślepej próby w parach dopasowanych, mające na celu ocenę **skuteczności i bezpieczeństwa** stosowania preparatu HP CELL VITARAN *ī* w iniekcjach śródskórnych w zmarszczki mimiczne wokół oczu. Cztery zabiegi w dwutygodniowych odstępach, 30 uczestników.

W toku badania **potwierdzono skuteczność i bezpieczeństwo** stosowania preparatu HP CELL VITARAN *ī* w iniekcjach śródskórnych w zmarszczki mimiczne wokół oczu. 93,2% osób z badanej grupy wykazało znaczną poprawę w okolicy poddanej zabiegowi bez wystąpienia działań niepożądanych.

Zaobserwowano również, że polinukleotydy mają **pozytywny wpływ na teksturę i koloryt skóry**. Wszyscy ochotnicy byli skłonni powtórzyć serię zabiegów preparatem HP CELL VITARAN *ī*



Oficjalny dystrybutor marki ^{HP}_{CELL} VITARAN *ĭ* w Polsce:

ODA Medical Sp. z o.o.

ul. Toruńska 18C/C

80-747 Gdańsk

www.vitaran.pl

www.odamedical.pl

+48 795 641 875

+48 606 979 670

